

FICHE TECHNIQUE


**THERMOMÈTRE MEDICAL JETABLE
NEXTEMP**



Le thermomètre médical **NextTemp** est un dispositif **jetable** de prise de température corporelle à part. En effet, son principe de fonctionnement à base de **cristaux liquides totalement autonome** – fonctionnement sans pile ou autre source d'énergie – et sa capacité à être utilisée en toute sécurité dans n'importe quelle situation, lui permette d'être très **pratique** et **disponible tout le temps**. Les bandelettes de mesure, en emballage individuel, se glissent partout et ne prennent pas de place ! De plus elles sont **réutilisables** tant qu'elles ne sont pas détériorées.

Après une prise de mesure, il suffit de patienter quelques instants pour que les cristaux retrouvent leur état initial et ainsi permettre une nouvelle prise de mesure.

Enfin la **précision** du Nexttemp est de +/- 0,1°C, identique à celle d'un thermomètre électronique !

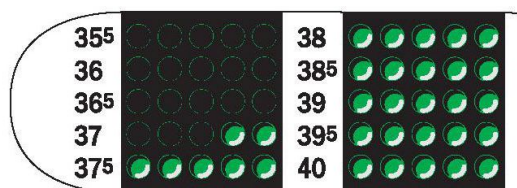

La température mesurée est indiquée par la coloration en vert des cristaux.



Caractéristiques techniques NexTemp

Gamme de prise de mesure	De +35,5°C à +40,4°C
Précision	± 0.1 °C
Structure	Bande en plastique contenant 50 cavités disposées sur une double matrice située à l'extrémité sensible du thermomètre
Utilisation	Laver les mains. Retirer le NexTemp de son emballage et procéder à la prise de mesure – axillaire ou buccale. Lecture du résultat immédiatement après la prise de mesure.
Sécurité	Les cristaux liquides utilisés sont non toxiques, non irritants et non allergisants
Réversibilité	Ce thermomètre est conçu pour redevenir automatiquement réutilisable après quelques minutes de non utilisation, mais son usage est individuel ; il est possible de prendre plusieurs fois de suite la température d'un même individu.
Température de stockage	Pas de conditions particulières. En cas de températures extrêmes, le NexTemp revient dans sa configuration initiale lors du retour en température normale. Idéalement à conserver entre +10°C et +30°C
Date de péremption	Thermomètres valables 5 ans à date de fabrication Date de péremption indiquée sur la boîte
Conditionnement	Boîte de 100 thermomètres en pochettes hermétiques individuelles
Temps de mesure	60 secondes
Garantie	2 ans
Conformités	CE0086
Références	41101

Sous réserve de modifications techniques - révision – 03/2018