

KIT D'AUTO-TEST ANTIGÉNIQUE

TEST RAPIDE POUR DÉTECTER LA COVID 19



LES + DU PRODUIT

SIMPLE ET PRECIS

Détection précise et fiable de l'antigène CoV-2 du SRAS et utilisation simple du test.

ULTRA RAPIDE

Résultat rapide avec un délai de 12 min.

Le test antigénique permet de détecter la présence du virus SARS-CoV-2 dans l'organisme d'un individu à un instant T. Le prélèvement optimal est nasopharyngé. En cas de test positif, il est préférable de le faire valider dans un laboratoire et de prendre les dispositions d'isolement précaunées par le gouvernement. Le test Goldsite est inscrit sur la liste de l'ANSM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION: détection de l'antigène cov-2 du SRAS

DÉLAI D'OBTENTION DU RÉSULTAT: 12 minutes

ÉCOUVILLON: écouvillonnage nasopharyngé

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: 2 à 30 °C

CONDITIONNEMENT : 5 tests / boîte

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT




Test positif:
Isolez vous et contactez un médecin



Test négatif :
Continuer les geste barrières



UTILISATION

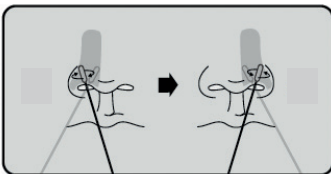

- 1 Retirer le couvercle du compte gouttes
- 2 Après avoir récupéré votre échantillon, insérer l'écouvillon dans le tube
- 3 Remuer l'écouvillon tout en appuyant (5/6 fois)
- 4 Insérer le tube dans l'emplacement prévu sur la boîte du kit. Laisser l'écouvillon reposer pendant 1 minute.
- 5 Remuer à nouveau pour bien mélanger le contenu
- 6 Retirer l'écouvillon tout en serrant les côtés du tube
- 7 Fixer et serrez le bouchon compte-gouttes.
- 8 Retourner doucement plusieurs fois
- 9 Retirer le bouchon blanc
- 10 Ajouter deux gouttes d'échantillon sur la cassette prévue à cette effet, et lire le résultat après 12 minutes



CE 1434 IVD zc 37°C i *

FT/TEST_PCR_GOLDSITE-0122