

MASQUE DE PROTECTION FFP2

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2 NR INDIVIDUEL À USAGE UNIQUE NON STÉRILE



LES + DU PRODUIT

- **MASQUE (DIT ÉGALEMENT DEMI-MASQUE) FILTRANT LES PARTICULES, MODÈLE BKG-N01, DE LA CLASSE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2.**
- **5 COUCHES DE FILTRATION EFFICACE**
- **FORME ERGONOMIQUE**
- **BANDEAU D'OREILLE ÉLASTIQUE CONFORTABLE - LONGUEUR 20 CM**
- **PINCE-NEZ RÉGLABLE**

Ce produit est conforme aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1: 2009 pour la protection contre les particules et répond aux exigences de la classe de protection FFP2 qui s'y trouve. Il offre ainsi une protection efficace contre les particules solides et liquides non volatiles (poussière, fumée, brouillard aérosol). La protection respiratoire n'est efficace que si le masque de protection est correctement sélectionné, ajusté et porté pendant tout le séjour dans la zone de danger. Masque filtrant pour la protection contre les particules de type FFP2 NR, modèle BKG-N01 avec bande élastique, pour «un usage unique», avec une barre de nez pour une meilleure adhérence et isolation autour du nez. Confortable à porter et ne gêne pas la respiration. Le masque filtrant pour protéger contre les particules de type FFP2 NR, modèle BKG-N01 est constitué de 5 couches qui sont: 1. 50g Tissu non tissé spunbond; 2. 25g Tissu meltblown; 3. 50g Coton; 4. 25g Tissu meltblown; 5. 30g Tissu non tissé spunbond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Masque sans latex, hypoallergénique.
- Efficacité de filtration > 95%.
- 20 masques par boîte / 24 boîtes par carton / 40 cartons par palette
- Couleurs disponibles: Blanc
- Référence : 60198

NORMES

Norme EN 149:2001 + A1:2009

Norme CE 2233

UTILISATION



Diriger le masque avec l'ouverture vers vous et la pince nasale vers le haut. Tenir le masque par la sangle avec les deux mains.



Couvrez complètement votre menton avec le masque. Assurez-vous que la pince nasale est pressée contre l'arête nasale.



Tirez les boucles sur vos oreilles.



Ajustez la pince nasale à la forme de notre nez et de votre visage en appuyant et en vous penchant avec les deux mains.

FT/MASQUE_FFP2-0122